

M175-1 ミエール“キュウイン”



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (120618)

－ I N D E X －

- はじめに／もくじ 1
- 目的／内容 2
- 取扱上の注意 3
- 使用手順／保管方法 4

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認
頂き、不備、破損等ありましたら弊社まで
御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



はじめに

この度は弊社商品 ミエール “キュウイン” をご購入頂き

まして、誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルを

よくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品

到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損個所等が無い

か点検して下さい。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意	3
使用手順／保管方法	4


目的

下記の吸引チューブの確認が可能

- 1 経口・経鼻吸引
- 2 挿管チューブ内の吸引
- 3 気管切開カニューレ内の吸引

内容

- | | |
|---------------------|-----|
| 1 本体 | 1 体 |
| 2 LED付吸引チューブ（専用箱入り） | 1 本 |
| 3 シリコンオイル | 1 本 |
| 4 乾電池(単4型アルカリ乾電池) | 2 本 |

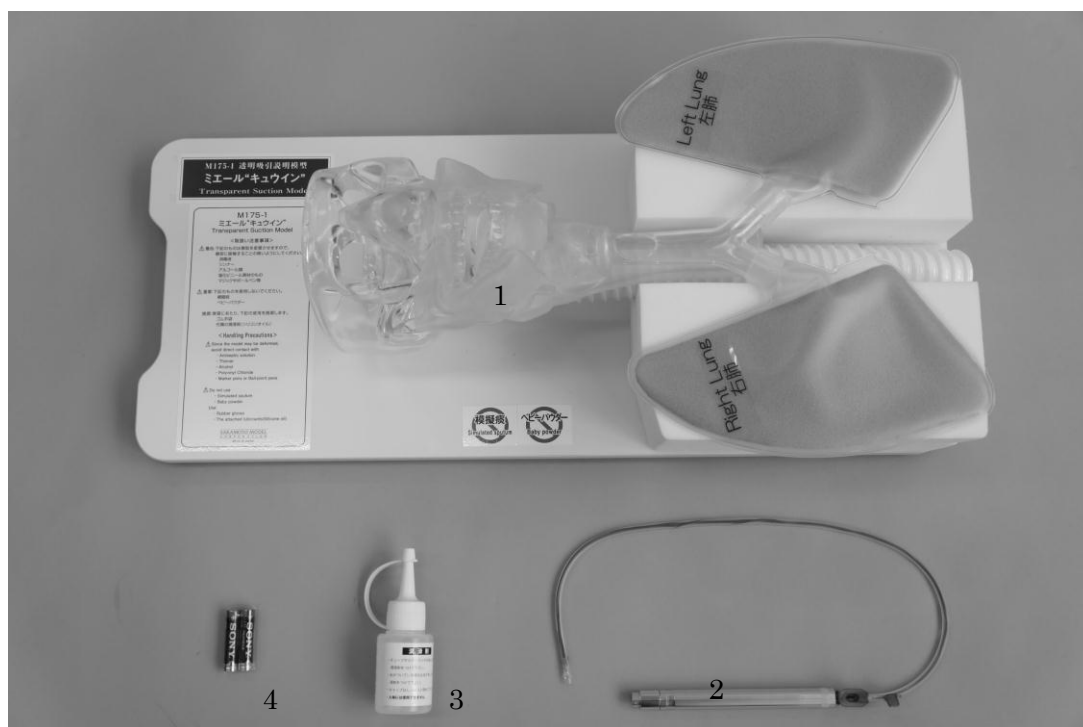

取扱上の注意

- 1 頭部に樹脂製品や溶剤が長時間触れますと変形する恐れがありますので、ご使用には十分注意して下さい。
- 2 頭部の材質上、汚れが付きやすいのでゴム手袋（粉が透明部に付着する恐れがありますのでパウダーフリー手袋）の着用をお勧めします。
またボールペンやマジックなどの汚れは付着しますと取れなくなりますのでご注意ください。
- 3 パウダーなどの粉が付着しますと透明感が損なわれますのでご注意ください
- 4 LED付吸引カテーテルは水にぬらしたり、水の中に浸したりしないで下さい。
故障の原因となります。
- 5 LED付吸引カテーテルのカテーテル部分は無理に折り曲げたりしないで下さい。断線の恐れがあります。
- 6 LED付吸引カテーテル挿入の前に付属の専用シリコンオイルを必ず塗布してご使用下さい。
尚、潤滑剤は必ず、付属の専用シリコンオイルのみご使用下さい。
(その他薬剤ご使用の場合、故障の原因となる恐れがあります。)
- 7 軽い汚れは、中性洗剤を用いてふき取ることができます。
(樹脂が溶けますのでシンナー等の溶剤を用いないで下さい)
- 8 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社までご連絡下さい。
- 9 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 10 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

使用手順

1 本体をハードケースから出し、滑りにくい机などに置いて実習して下さい。

2 LED付吸引カテーテルの電池ボックス部上部を回転させ、電池を入れて下さい。
電池は単4型アルカリ乾電池2本をご使用下さい。
取り付けは+、-に注意して入れて下さい。
ランプの点灯が暗くなりましたら
電池を新しいものと交換して下さい。



3 LED付吸引カテーテルの電池ボックス上部を押すとランプが点灯します。



4 LED付吸引カテーテルをご使用になる場合はシリコンオイルを塗布して下さい。

保管方法

1 収納時に直射日光や、高温・多湿の場所に保管すると、変形・変質することがありますので注意して下さい。

2 保管するときは、電池を必ず取り出して下さい。
電池を入れたまま保管すると、電池が腐食し通電不良の原因となりますので
ご注意下さい。

3 LED付吸引カテーテルは付属の専用ボックス内に無理に折り曲げずに
収納して下さい。

株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29
------	------------------------------